


ELEMENT ZIRCON BLANK SHINE 3DML

INSTRUKCE K SINTROVÁNÍ

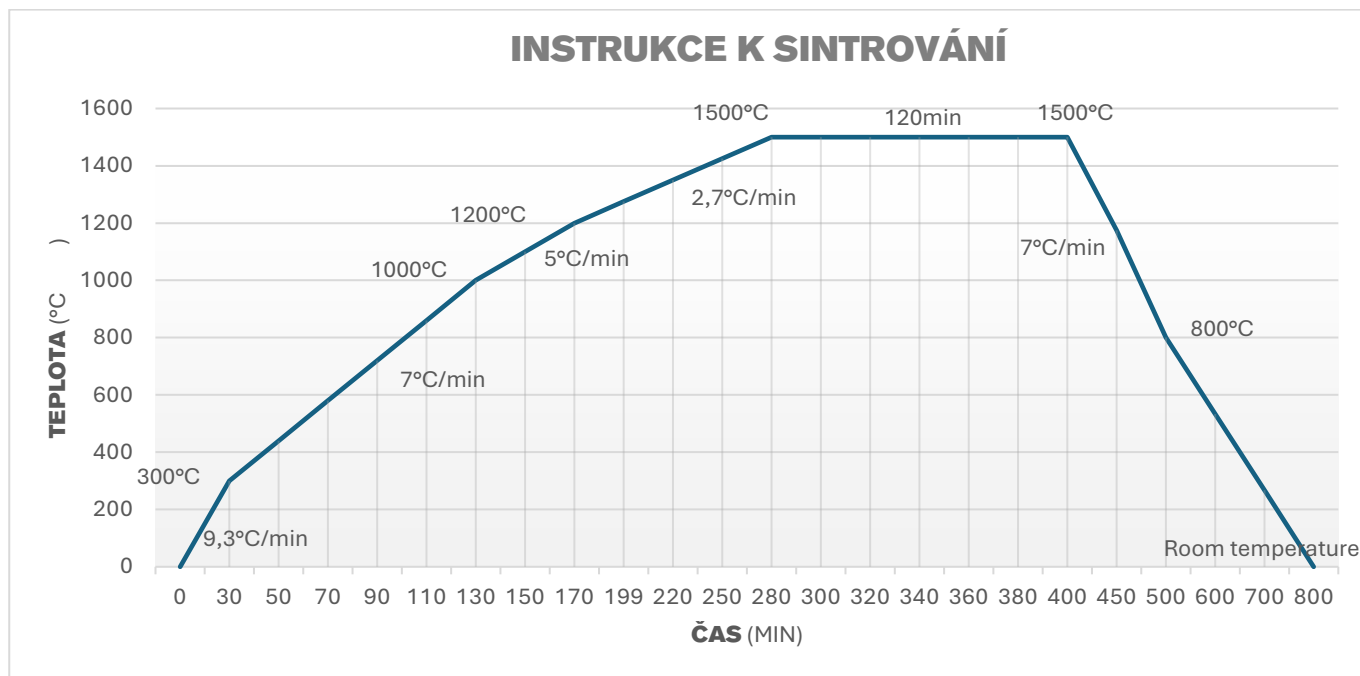

Fáze	Počáteční teplota (°C)	Finální teplota (°C)	Čas (min.)	Rychlost ohřevu (°C/min)
Fáze 1	0	300	30	9,3
Fáze 2	300	1000	100	7
Fáze 3	1000	1200	40	5
Fáze 4	1200	1500	110	2,7
Fáze 5	1500	1500	120	Udržovat teplotu
Fáze 6	1500	800	100	-7
Fáze 7	800	Pokojová teplota	Volné chlazení	----