



ELEMENT ZIRCON BLANK SHINE 4DML

INSTRUKCE K SINTROVÁNÍ

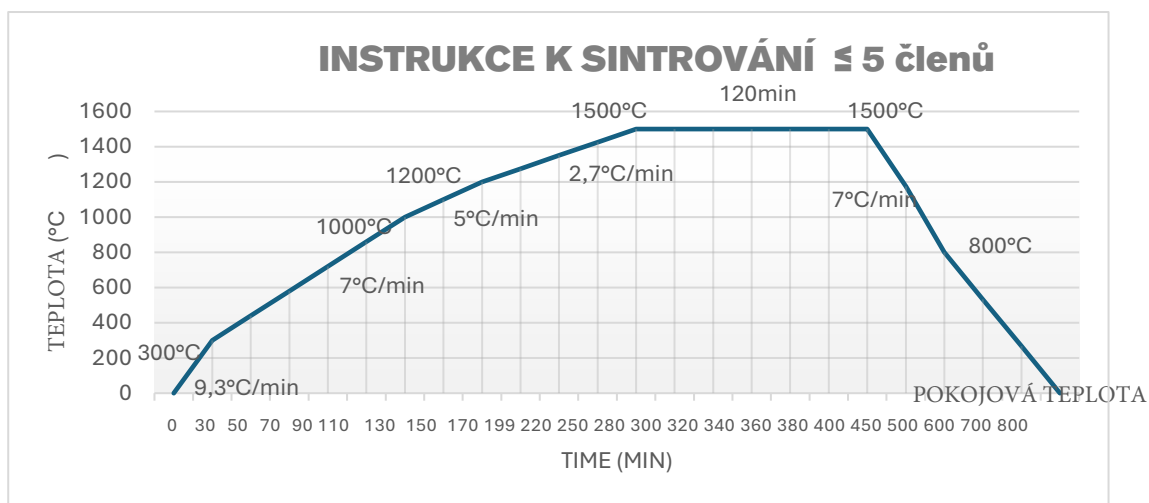


Fáze	Počáteční teplota (°C)	Finální teplota (°C)	Čas (min.)	Rychlost ohřevu (°C/min)
Fáze 1	0	300	30	9,3
Fáze 2	300	1000	100	7
Fáze 3	1000	1200	40	5
Fáze 4	1200	1500	110	2,7
Fáze 5	1500	1500	120	Udržovat teplotu
Fáze 6	1500	800	100	-7
Fáze 7	800	Pokožová teplota	Volné chlazení	----

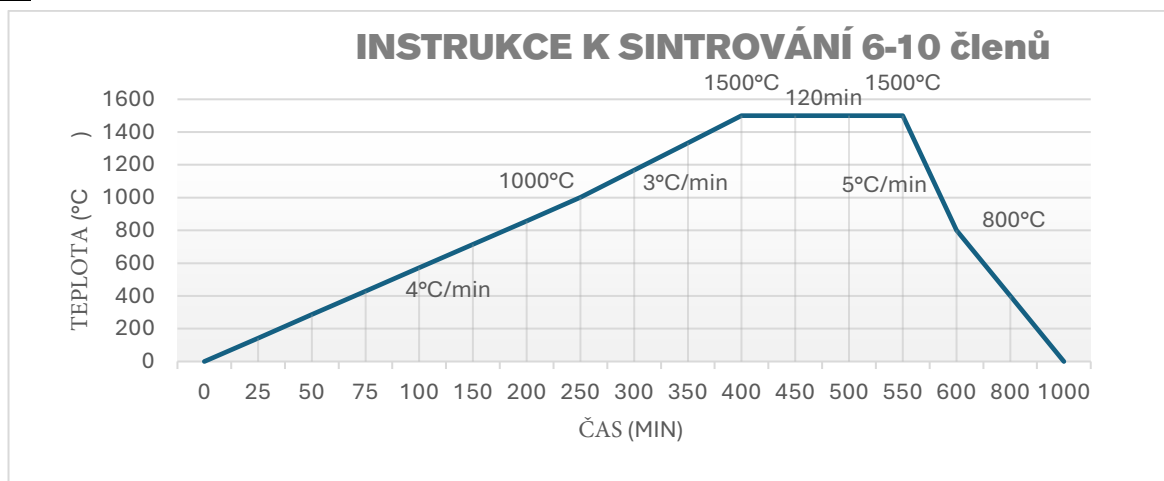

Fáze	Počáteční teplota (°C)	Finální teplota (°C)	Čas (min.)	Rychlost ohřevu (°C/min)
Fáze 1	20	1000	245	4
Fáze 2	1000	1500	167	3
Fáze 3	1500	1500	120	Udržovat teplotu
Fáze 4	1500	800	140	-5
Fáze 5	800	Pokožová teplota	Volné chlazení	----

INSTRUKCE K SINTROVÁNÍ 1 1-14 členů

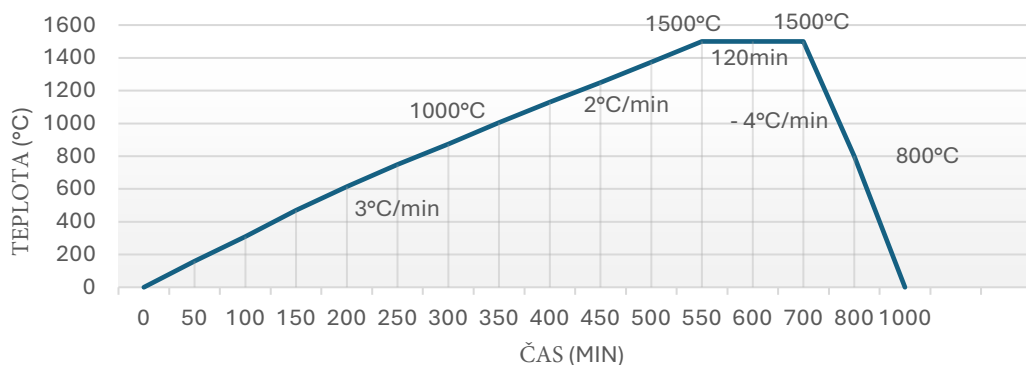

Fáze	Počáteční teplota (°C)	Finální teplota (°C)	Čas (min.)	Rychlost ohřevu (°C/min)
Fáze 1	20	1000	326	3
Fáze 2	1000	1500	250	2
Fáze 3	1500	1500	120	Udržovat teplotu
Fáze 4	1500	800	175	-4
Fáze 5	800	Pokojová teplota	Volné chlazení	----